

PACK 30

L 120,5 mm X H 170,5 mm X P 39,5 mm



THUASNE®

Zone pour collage
étiquette 55x18mm

A CONSERVER POUR LA VALIDATION
A MASQUER POUR L'IMPRESSON

Rhizoimmo



Rhizoimmo

Attelle de stabilisation
du pouce

RHIZARTHROSE



www.thuasne.com



Rhizoimmo

1	13 - 17 cm
2	17 - 23 cm



Stabilisation

Rhizoimmo

Description/destination

Cet dispositif est une attelle de pouce permettant la stabilisation de la main et du poignet.

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des troubles de la main et du poignet.

Composition : Polyamide - Polyuréthane

Composants typiques : Acier inoxydable

Stabilisation de pouce grâce à une armature en fil métallique.

Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant d'utiliser ce dispositif.

Indications : Rhizarthrose

Contre-indications : Inflammation de la main et du poignet.

Précautions : Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas utiliser le dispositif sans la consultation d'un professionnel de santé.

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau de correspondance.

Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la bonne application, l'ajustement et la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de l'usage non conforme de ce dispositif.

THUASNE

120, rue Marquis Adrien
Lévy
92100 Nanterre
France

CE

THUASNE

120, rue Marquis Adrien
Lévy
92100 Nanterre
France

© Studio Caterin



avec ou sans
impression en
fonction du lieu
d'impression

© Thuasne - 651101(2023 - 12)